

# TEST DE GESTATION ALERTYS™ ONFARM

Auto-test rapide, réalisable directement par l'éleveur pour la confirmation de la gestation chez les vaches.

## Descriptif produit

- Le test de gestation Alertys™ OnFarm détecte les glycoprotéines associées à la gestation (PAG) dans le sang total (EDTA) dès 28 jours suivant la reproduction et 70 jours après le vêlage.
- Test facile à réaliser en élevage avec quelques gouttes de sang
- Identification des vaches vides dès 28 jours après la fécondation
- Résultats fiables (> 99%) et rapides (5 à 20 minutes)
- Kit comprenant le test et accessoires (pipette et solution de lavage) ainsi que l'aiguille et le tube pour la prise de sang.




### Référence

Test gestation sang Alertys OnFarm

520014

## Mode d'emploi

- Placer le test de gestation Alertys\* OnFarm sur une surface propre et plane et noter l'identification de l'échantillon.
- Homogénéiser les échantillons de sang total ou de sérum en retournant le tube. Presser fermement l'ampoule supérieure de la pipette, placer l'embout de la pipette dans le tube contenant l'échantillon et relâcher la pression sur l'ampoule pour aspirer le prélèvement dans la pipette. S'assurer que la tige inférieure de la pipette est complètement remplie sans bulles d'air. Le volume d'échantillon en excès ira dans l'ampoule inférieure de la pipette (image A)
- Presser l'ampoule supérieure pour distribuer l'échantillon dans le puits d'échantillon du dispositif (image B). Le volume d'échantillon en excès restera dans l'ampoule inférieure de la pipette. Ne pas dépasser 2 minutes entre le dépôt de sang et l'ajout de la solution de lavage.
- Saisir et tourner l'embout du tube de la solution de lavage (image C). Tenir verticalement le tube de solution de lavage à usage unique et presser avec précaution pour déposer 6 gouttes dans le puits d'échantillon. Ajouter la solution de lavage dans les 2 minutes suivant l'ajout de l'échantillon.
- Faire une lecture des résultats sous une lumière suffisante au bout de 20 minutes. L'animal est gestant si les 2 lignes du test T et du contrôle C apparaissent dans les 20 minutes.
- Si nécessaire, les tests peuvent être lus jusqu'à 50 minutes après l'ajout de la solution de lavage. Au-delà, les résultats ne sont plus valides.

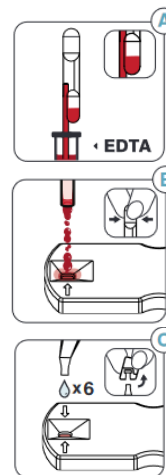



Réalisez la prise de sang à la queue de la vache. Retournez le tube (10 fois) immédiatement après la prise de sang.



Suivez ces différentes étapes pour réaliser un test. Vous pouvez exécuter plusieurs tests en même temps.



Résultats lisibles de 5 à 20 minutes.

