

POCHE A COLOSTRUM



Poche à colostrum

La poche à colostrum permet le stockage, la conservation et l'administration du colostrum après évaluation de sa qualité.

Caractéristiques techniques

- ❖ Poche en aluminium
- ❖ Contenance : 4 litres
- ❖ Peut être pasteurisée, congelée ou réchauffée
- ❖ Tétine ou sonde de drenchage adaptable sur la poche pour l'administration du colostrum. Se visse sur la poche à colostrum.
- ❖ Le dispositif d'aide au remplissage permet de faciliter le remplissage des poches à colostrum.
- ❖ La poche isotherme permet de maintenir le colostrum au chaud plus longtemps.
- ❖ Le kit de 10 poches à colostrum contient 10 poches, 1 tétine et 1 sonde de drenchage.



Références

- Poches à colostrum kit de 10 - 530020
- Poches à colostrum (x5) - 530021
- Dispositif d'aide au remplissage – 530022
- Tétine pour poche à colostrum - 530023
- Sonde pour poche à colostrum - 530024
- Poche isotherme - 530025

Mode d'emploi

- Traire le colostrum rapidement après vêlage
- Vérifier la qualité du colostrum à l'aide d'un réfractomètre
- Cocher la qualité correspondante (bon, moyen ou mauvais) sur la poche en indiquant la date et le numéro de la vache traite.
- Transvaser le colostrum dans la poche, à l'aide du dispositif de remplissage
- Pasteuriser à 60° pendant 60 minutes au bain marie (optionnel)
- Réfrigérer ou congeler
 - o Stockage < 5°C : à consommer dans les 7 jours
 - o Congélation à -15°C : stockage possible 1 an
- Décongeler et/ou réchauffer à la température de la buvée (température ambiante, bain marie, micro-ondes fonction décongélation)
- Administrer le colostrum, à l'aide de la tétine ou de la sonde de drenchage qui se visse sur la poche

