

# TRUSTI TUBER



## Trusti Tuber

Le Trusti Tuber permet un drenchage rapide et efficace, en réduisant le stress et l'inconfort du veau.


## Caractéristiques techniques

- Embout rigide qui se maintient d'une seule main
- Capacité importante : 4 litres
- Tube flexible transparent permettant le contrôle de l'écoulement et facilitant le nettoyage
- Bague de blocage et indication du poids du veau pour un positionnement facile du tube flexible
- Poignée ergonomique
- Valve performante, pour un débit rapide même avec du colostrum épais



## Mode d'emploi

Placer l'embout rigide contre le museau du veau

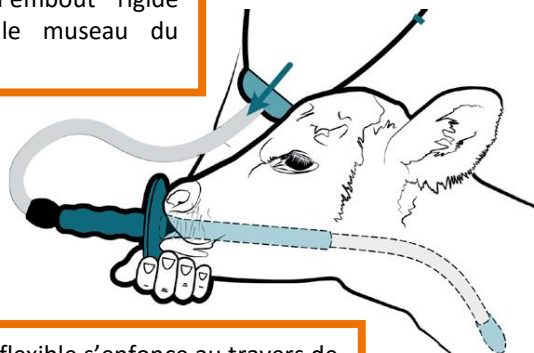

Le tube flexible s'enfonce au travers de l'embout rigide pour un positionnement facilité dans l'œsophage.  
Relever la bouteille uniquement lorsque le tube est correctement positionné dans l'œsophage.



### Bague de blocage et indication du poids

- Considérer les marquages de poids du veau comme des longueurs minimales d'introduction du tube flexible
- Positionner la bague de blocage à droite du marquage
- Ne pas sous-estimer le poids du veau

### Pendant le drenchage :

- Maintenir l'embout rigide en place et le tenir en même temps que le museau du veau afin de suivre les éventuels mouvements de tête.
- Ne jamais laisser le veau baisser sa tête au-dessous du niveau de l'estomac.

### Après le drenchage :

- Attendre au moins une seconde après que le liquide ait fini de s'écouler dans le tube puis le retirer doucement.
- Nettoyer soigneusement le Trusti Tuber à l'aide de la brosse goupillon.

