

KIT 5 ANALYSES RAPIDES DIARRHEES VEAU



Kit d'analyse rapide pour les diarrhées des veaux

Le kit d'analyse rapide permet la détection des agents pathogènes majeurs et fréquents responsables de diarrhées néonatales entre la naissance et 3 semaines d'âge environ. Le kit rapide permet la détection de virus (rotavirus et coronavirus), de bactéries (E. coli F5 (K99) et CS31A) et de parasites (cryptosporidies)



Référence

Kit d'analyses diarrhées (5 tests) – 530930



Mode d'emploi

Mettre des gants pour réaliser le test.

L'échantillon à analyser ne doit pas être trop concentré (ne pas préparer un échantillon supérieur à un volume correspondant à une cuillère rase).



1 Prélever les matières fécales au niveau du rectum du veau.



2 Eliminer le surplus à l'aide de la spatule fournie, afin d'obtenir une cuillère rase.



3 Diluer le prélèvement dans le liquide contenu dans le flacon



4 Bien agiter pour le tube d'échantillon pour homogénéiser.



5 Déchirer l'enveloppe en aluminium.



6 Retirer le capuchon de protection du tube

KIT 5 ANALYSES RAPIDES DIARRHEES VEAU



Mode d'emploi




Casser la pointe bleue



Placer la cassette sur une surface complètement plane. Déposer 3 gouttes de réactif dans chaque puits. Attendre 10 minutes. Le liquide migre progressivement le long des bandelettes.



Après 10 minutes, interpréter les résultats pour chaque agent pathogène recherché en se référant à l'image 10 ci-dessous

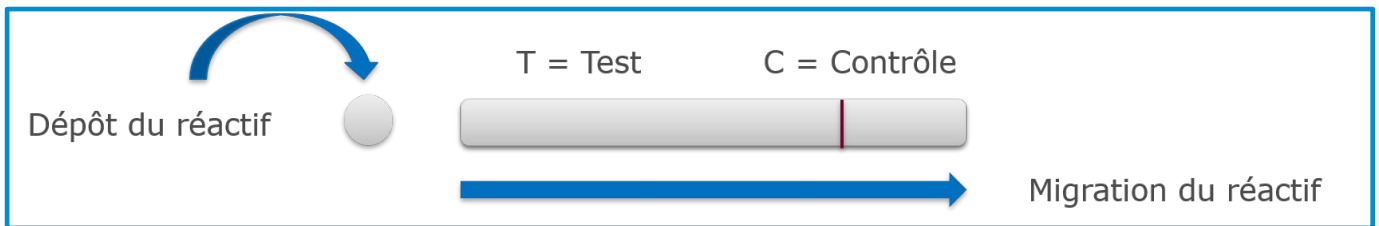

Interprétation des résultats obtenus

Avant-développement

Positif

Positif

Faiblement Positif

Négatif

Invalide

Migration incomplète

1 ligne = négatif 2 lignes = positif

10